

# Guide de référence rapide pour l'adaptateur PrecisionPoint réutilisable non stérile EV29L

## 1. Retraitement avant la première utilisation et chaque usage consécutif

### a. Nettoyage : Cidezyme, 5 minutes

- Utiliser une brosse adaptée pour les canaux et les canules
- Rincer tous les canaux et toutes les canules avec le produit nettoyant
- Rincer pendant 5 minutes après le nettoyage.

### b. Stérilisation


#### • Stérilisation : autoclave, classe B

- 134 °C (273 °F) pendant 3 min
- 132 °C (270 °F) pendant 4 min

### c. Inspection après retraitement (absence de fissures, de décoloration ou de dommages visibles)

## 2. Fixation à la sonde EV29L


Installer l'adaptateur en plastique sur la gaine. Fixer chaque bras du guide PrecisionPoint sur les côtés de l'adaptateur. Le guide PrecisionPoint est à usage unique et doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant.

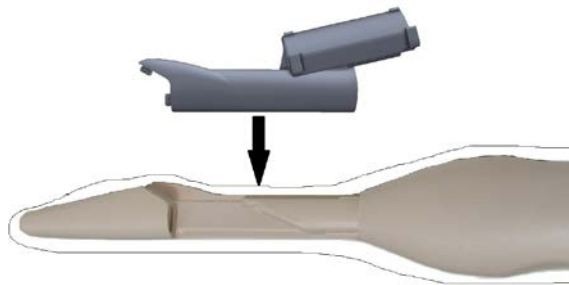

2a



2b

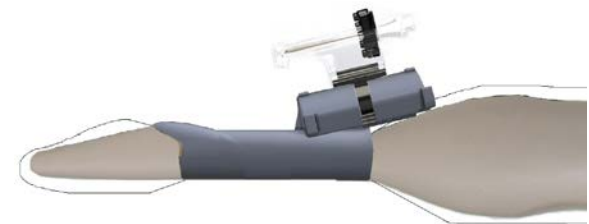

2c

### 3. Durée de vie

Lorsqu'il est utilisé avec soin, l'adaptateur PrecisionPoint réutilisable non stérile EV29L est conçu pour une durée de vie utile de 3 ans ou de 75 cycles de retraitement, selon l'échéance qui survient en premier.

Se reporter aux manuels suivants pour les instructions détaillées :

Étape	Manuel	Section du manuel
1. <b>Retraitement</b> (avant la première utilisation et chaque usage consécutif)	Guide d'entretien, de nettoyage et d'utilisation de la sonde EV29L	Chapitre 4 : Retraitement Section 3.2, 3.3 et 3.5 : Retraitement des guide-aiguilles réutilisables et des accessoires*  * Les instructions de nettoyage, de stérilisation et d'inspection s'appliquent également à l'adaptateur réutilisable PrecisionPoint EV29L.
2. <b>Fixation à la sonde EV29L</b>	Guide d'entretien, de nettoyage et d'utilisation de la sonde EV29L	Chapitre 3 : Préparation à l'acquisition d'images Section 2.1.1 : Fixation du guide-aiguille*  * Ces instructions s'appliquent également à l'adaptateur réutilisable PrecisionPoint EV29L.

Pour toute **assistance technique** au sujet du système de micro-échographie ExactVu™ ou de l'adaptateur PrecisionPoint réutilisable EV29L, contacter l'assistance technique d'Exact Imaging. Consultez le site <https://www.exactimaging.com/contact-us> pour connaître les coordonnées pour votre région.



**Exact Imaging Inc.**  
7676 Woodbine Avenue, Unit 15  
Markham, ON L3R 2N2, Canada  
+1.905.415.0030  
[info@exactimaging.com](mailto:info@exactimaging.com)



**Emergo Europe**  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
Pays-Bas



**MedEnvoy Switzerland**  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Suisse

Personne responsable au Royaume-Uni  
**Emergo Consulting (UK) Limited c/o  
Cr360 – UL International**  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ Royaume-Uni



**Exact Imaging BVBA**  
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508  
9000 Gand  
Belgique

#### Numéros de référence Exact Imaging

- EV-29L : Sonde EV29L
- EV-BIOGR-PP : Adaptateur PrecisionPoint réutilisable EV29L
- EV-SYS-220 : Système d'imagerie par micro-échographie ExactVu™ (220V)
- EV-SYS-120 : Système d'imagerie par micro-échographie ExactVu™ (120V)
- EV-SYS-100 : Système d'imagerie par micro-échographie ExactVu™ (100V)